

**WARNUNG:** Diese Software bietet keinerlei medizinischen Rat und kann deshalb für diesen Zweck auch nicht herangezogen werden. Nehmen Sie keine wesentlichen Änderungen in Ihrem Behandlungsplan vor, ohne zuvor mit Ihrem Arzt gesprochen zu haben.

Der DexCom Data Manager 3 (DM<sup>®</sup>3) ist eine benutzerfreundliche Gerätesoftware zur Übertragung von mit Ihrem kontinuierlichen Gewebeglukosekontrollsystem SEVEN<sup>®</sup> oder SEVEN PLUS gespeicherten Gewebeglukosedaten auf einen PC. Mehrere Benutzer des SEVEN bzw. des SEVEN PLUS können ihre Gewebeglukoseinformationen mit DM3 auf einen PC übertragen.

## Data Manager<sup>®</sup> 3

[www.DexCom.com](http://www.DexCom.com)



CE 0050

**Lesen Sie bei Fragen die Hilfedatei zu DM3 unter:**

[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)



USA: DexCom, Inc.  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121  
+1.858.200.0200

Außerhalb der USA: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertragspartner.



Meditech Strategy Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129 NL-6291  
Vaals  
+31.43.306.3320

**Live Uninterrupted<sup>®</sup>**

## Data Manager 3

### Mindestsystemvoraussetzungen:

Die vollständigen Systemvoraussetzungen finden Sie in der Hilfedatei zu DM3 unter [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com):

- Microsoft .NET Framework 2.0
- 1,4 GHz Pentium 4
- 512 MB RAM mit 100-150 MB freiem Speicherplatz
- 36 MB freier Festplattenspeicher (280 MB für .NET Framework 2.0)
- Bildschirmauflösung – 1024 x 768 Pixel
- CD-ROM-Laufwerk für die Installation von CD
- USB-Schnittstelle

DM3 kann auf Computern mit folgenden Betriebssystemen ausgeführt werden:

- Microsoft® Windows Vista®, XP Service Pack 2, Windows® 2003 Server

---

**HINWEIS: DexCom bietet keinen Support bei Kompatibilitätsproblemen auf Mac-Computern.**

---

### Installationsgrundlagen:

1. Legen Sie die DM3-CD in das Laufwerk Ihres PCs ein oder laden Sie DM3 von der DexCom-Website unter [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com) herunter. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Download Now“ (Jetzt herunterladen).
2. Ein Dialogfeld mit weiteren Anweisungen wird angezeigt.
3. Wenn DM3 nicht an einem anderen Ort installiert wurde, finden Sie das Programm im Startmenü unter *Alle Programme\DexCom\DexCom DM3*.

**Wenn kein Dialogfeld angezeigt wird und Sie eine DM3-CD verwenden, befolgen Sie folgende Anleitungen:**

1. Legen Sie die DM3-CD in das Laufwerk Ihres PCs ein.
2. Öffnen Sie den „Arbeitsplatz“ auf dem Desktop Ihres PCs.
3. Doppelklicken Sie auf das CD-Laufwerk.
4. Ein Dialogfeld mit weiteren Anweisungen wird angezeigt.
5. Wenn DM3 nicht an einem anderen Ort installiert wurde, finden Sie das Programm im Startmenü unter *Alle Programme\DexCom\DexCom DM3*.