

**ADVERTENCIA:** Este software no proporciona consejo médico de ningún tipo y no debe utilizarse con ese fin. No modifique su programa de tratamiento de forma sustancial sin consultar previamente con su proveedor de atención sanitaria.

DexCom Data Manager 3 (DM<sup>3</sup>) es un programa de software adicional sencillo de usar que transfiere a un PC los datos almacenados sobre la glucosa recogidos por su sistema de control continuo de glucosa SEVEN<sup>®</sup> o SEVEN PLUS. Con DM3, varios usuarios de SEVEN y SEVEN PLUS pueden transferir su información sobre niveles de glucosa a un PC.

## Data Manager<sup>®</sup> 3

[www.DexCom.com](http://www.DexCom.com)



CE 0050

**En caso de que tenga alguna pregunta, consulte el archivo de ayuda de DM3 en:**

[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)



EE. UU.: DexCom, INC  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121  
+1.858.200.0200

Fuera de EE. UU: póngase en contacto con su distribuidor local.



Meditech Strategy Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129 NL-6291  
Vaals  
+31.43.306.3320

**Live Uninterrupted<sup>®</sup>**

## Data Manager 3

### Requisitos mínimos del sistema:

Consulte el archivo de ayuda de DM3 en [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com) para ver todos los requisitos del sistema:

- Microsoft .NET Framework 2.0
- Pentium 4 1,4 GHz
- 512 MB RAM, con 100-150 MB libres
- 36 MB de espacio libre en el disco duro (280 MB para .NET Framework 2.0)
- Pantalla: 1.024 x 768 píxeles
- Unidad de CD-ROM para instalar los CD
- Puerto bus universal en serie (USB)



DM3 se puede ejecutar en equipos que dispongan de estos sistemas operativos:

- Microsoft® Windows Vista®, XP Service Pack 2, Windows® 2003 Server

---

**NOTE: DexCom does not provide troubleshooting for Mac compatibility issues.**

---

### Pasos básicos de la instalación:

1. Cargue el CD de DM3 en su PC o descargue DM3 desde el sitio web de DexCom, [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com). Haga clic en el botón "Download Now" (Descargar ahora).
2. Debería aparecer un cuadro de diálogo, donde se le presentarán los pasos que debe seguir.
3. A no ser que lo haya guardado en otra ubicación, DM3 estará en su menú Inicio, en *Todos los programas\DexCom\DexCom DM3*.

**Si no aparece un cuadro de diálogo y está utilizando el CD de DM3, siga estas instrucciones:**

1. Cargue el CD de DM3 en su PC.
2. Abra "Mi PC" desde el escritorio del equipo.
3. Haga doble clic en la unidad de CD.
4. Debería aparecer un cuadro de diálogo, donde se le presentarán los pasos que debe seguir.
5. A no ser que lo haya guardado en otra ubicación, DM3 estará en su menú Inicio, en *Todos los programas\DexCom\DexCom DM3*.