



לפני שאתם מנסים להשתמש במכשירי ה-DexCom, אנא קראו את כל המידע המצוי בדף זה. המידע המצוי בדף זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או לטיפול רפואי. ייתכן שתצטרך להתייעץ עם רופאך לגבי שימוש במכשירי ה-DexCom. ייתכן שתצטרך להתייעץ עם רופאך לגבי שימוש במכשירי ה-DexCom.

ה-DexCom Data Manager 3 (DM3) הוא מערכת לניהול נתונים המיועדת לרופאים ולמטפלים. המערכת מאפשרת לרופאים ולמטפלים לנהל את הנתונים של מטופליהם באופן יעיל וקל. המערכת מאפשרת לרופאים ולמטפלים לנהל את הנתונים של מטופליהם באופן יעיל וקל. המערכת מאפשרת לרופאים ולמטפלים לנהל את הנתונים של מטופליהם באופן יעיל וקל.



[www.DexCom.com](http://www.DexCom.com)



CE 0050

בכתובת DM3 במקרה שמתעוררות שאלות, ניתן לעיין בקובץ העזרה של [www.DexCom.com](http://www.DexCom.com)



Meditech Strategy Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129 NL-6291  
EN Vaals  
+31.43.306.3320



בארה"ב: DexCom, INC  
Sequence Drive, San Diego, CA 92121 6340  
+1.858.200.0200

מחוץ לארה"ב: צור קשר עם המפיץ המקומי

Live Uninterrupted®





# 3

## Data Manager 3 דרישות מערכת מינימליות:

לקבלת הרשימה המלאה של דרישות המערכת, עיין בקובץ העזרה של DM3 בכתובת [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)

• Microsoft .NET Framework 2.0

• 1.4 GHz Pentium 4

• זיכרון RAM בגודל 512 MB, 100-150 MB פנויים

• 36 MB פנויים בכונן הקשיח (280 MB עבור Microsoft .NET Framework 2.0)

• מסך בעל רזולוציה של 1024 x 768 פיקסלים

• כונן תקליטורים (CD) להתקנה מתקליטור CD

• יציאת Universal Serial Bus (USB)

ניתן להפעיל את DM3 במחשבים עם מערכות ההפעלה הבאות:

• Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Server 2003, Windows® XP Service Pack 2

---

**הערה: DexCom אינה מספקת פתרון לבעיות תאימות תוכנה למחשבי Mac.**

---

## שלבי התקנה בסיסיים:

1. הכנס את תקליטור התוכנה של DM3 לכונן במחשב, או הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של DexCom בכתובת [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com). לחץ על הלחצן Download Now (הורד עכשיו).

2. מופיעה תיבת דו-שיח ובה הוראות לביצוע ההתקנה.

3. אם לא תשנה את נתיב ההתקנה, התוכנית DM3 תופיע בתפריט 'התחל', כל התוכניות, DexCom, DexCom DM3.

**אם ההתקנה מתבצעת מתקליטור ותיבת הדו-שיח אינה מופיעה, פעל באופן הבא:**

1. הכנס את תקליטור ההתקנה של DM3 לכונן במחשב.

2. פתח את 'המחשב שלי' בשולחן העבודה של המחשב.

3. לחץ פעמיים על סמל כונן התקליטורים.

4. מופיעה תיבת דו-שיח ובה הוראות לביצוע ההתקנה.

5. אם לא תשנה את נתיב ההתקנה, התוכנית DM3 תופיע בתפריט 'התחל', כל התוכניות, DexCom, DexCom DM3.

