

AVVERTENZA: questo software non fornisce consigli medici e non si può fare affidamento su di esso per tale scopo. Non apportare modifiche significative nel proprio programma di trattamento senza parlare con il proprio medico.

DexCom Data Manager 3 (DM³) è un programma software facile da usare che consente di trasferire su un personal computer (PC) i dati del glucosio memorizzati dal sistema di monitoraggio continuo della glicemia SEVEN[®] o SEVEN PLUS. Con DM3 più utenti SEVEN e SEVEN PLUS possono trasferire i propri dati glicemici sul PC.

Data Manager[®] 3

www.DexCom.com



CE 0050

In caso di domande, fare riferimento al file della guida di DM3 che può essere richiesto al seguente indirizzo:

www.dexcom.com



USA: DexCom, INC
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121
+1.858.200.0200

Fuori dagli USA: rivolgersi al distributore di zona



Meditech Strategy Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129 NL-6291
Vaals
+31.43.306.3320

Live Uninterrupted[®]

Data Manager 3

Requisiti minimi di sistema:

Leggere il file della guida di DM3 all'indirizzo www.dexcom.com per un elenco completo dei requisiti di sistema:

- Microsoft .NET Framework 2.0
- Pentium 4 da 1,4 GHz
- 512 MB di Ram con 100-150 MB di spazio libero
- 36 MB di spazio libero sul disco fisso (280 MB per .NET Framework 2.0)
- Schermo – 1024 x 768 pixel
- Unità CD Rom per installazione da CD
- Porta Universal Serial Bus (USB)

DM3 può essere eseguito su computer dotati dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows Vista®, XP Service Pack 2, Windows® 2003 Server

NOTA: DexCom non fornisce informazioni per la risoluzione dei problemi di compatibilità su computer Mac.

Procedura base per l'installazione:

1. Caricare il CD di DM3 nel PC o scaricare DM3 dal sito Web di DexCom all'indirizzo www.dexcom.com. Fare clic sul pulsante “Download Now” (Scarica ora).
2. Dovrebbe aprirsi una finestra di dialogo con le istruzioni da seguire.
3. Se non è salvato in un'altra posizione, DM3 si trova nel menu Start sotto *Programmi\DexCom\DexCom DM3*.

Se non viene visualizzata la finestra di dialogo e si sta utilizzando il CD di DM3, eseguire la procedura seguente:

1. Caricare il CD di DM3 nel PC.
2. Aprire “Risorse del computer” dal desktop del PC.
3. Fare doppio clic sull'unità del CD.
4. Dovrebbe aprirsi una finestra di dialogo con le istruzioni da seguire.
5. Se non è salvato in un'altra posizione, DM3 si trova nel menu Start sotto *Programmi\DexCom\DexCom DM3*.