

**WAARSCHUWING:** Deze software biedt op geen enkele wijze medisch advies en er kan niet voor dat doeleinde op worden vertrouwd. Breng geen fundamentele wijzigingen aan in uw behandeling zonder met uw zorgverlener te overleggen.

DexCom Data Manager 3 (DM<sup>3</sup>) is een eenvoudig te gebruiken aanvullend softwareprogramma waarmee de opgeslagen glucosegegevens van uw SEVEN<sup>®</sup> of SEVEN PLUS Continue-glucosemonitoringsysteem naar een personal computer (pc) kunnen worden overgebracht. Meerdere gebruikers van SEVEN en SEVEN PLUS kunnen met DM3 hun glucosegegevens op één pc overbrengen.



[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)



CE 0050

**Als u vragen hebt, raadpleeg dan het Helpbestand van DM3 op:**  
[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)



VS: DexCom, Inc.  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121 USA  
+1.858.200.0200  
[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)  
Buiten de VS: neem contact op met uw plaatselijke distributeur



MediTech Strategic Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129  
NL- 6291 EN Vaals  
Tel. +31.43.306.3320  
Fax. +31.43.306.3338

**Live Uninterrupted<sup>®</sup>**

## Data Manager 3

### Minimale systeemvereisten:

Raadpleeg het Helpbestand voor DM3 op [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com) voor de volledige systeemvereisten:

- Microsoft .NET Framework 2.0
- 1.4 GHz Pentium 4
- 512 MB Ram met vrij geheugen van 100-150 MB
- 36 MB aan vrije ruimte op de harde schijf (280 MB bij .NET Framework 2.0)
- Scherm – 1024 x 768 pixels
- CD-ROM-drive voor het plaatsen van cd
- Universal Serial Bus (USB)-poort

DM3 kan worden gebruikt op computers met de volgende besturingssystemen:

- Microsoft® Windows Vista®, XP Service Pack 2, Windows® 2003 Server

---

**LET OP: DexCom verleent geen service voor probleemoplossing bij problemen met de compatibiliteit met Mac-computers.**

---

### Basisinstructies voor de installatie:

1. Stop de DM3-cd in uw pc of download DM3 vanaf de Dexcom-website op [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com). Klik op de knop "Download Now".
2. Er verschijnt een dialoogvak, waarin u instructies ziet die u moet volgen.
3. Tenzij u het programma op een andere plaats opslaat, vindt u DM3 in uw menu Start onder *Alle Programma's\DexCom\DexCom DM3*

**Indien er geen dialoogvak verschijnt en u gebruikt een DM3-cd, volg dan deze instructies:**

1. Plaats de DM3-cd in uw pc.
2. Open "Mijn Computer" op het bureaublad van uw pc.
3. Dubbelklik op het cd-station.
4. Er verschijnt een dialoogvak, waarin u instructies ziet die u moet volgen.
5. Tenzij u het programma op een andere plaats opslaat, vindt u DM3 in uw menu Start onder *Alle Programma's\DexCom\DexCom DM3*.