

**VARNING:** Det här programmet erbjuder inga medicinska rekommendationer och kan inte användas i sådant syfte. Gör inga grundläggande ändringar i behandlingsprogrammet utan att ha talat med ditt diabetesteam.

DexCom Data Manager 3 (DM<sup>3</sup>) är en användarvänlig programvara som överför lagrade glukosdata från SEVEN<sup>®</sup>- eller SEVEN PLUS<sup>®</sup>-glukosmätningssystemet till en dator (PC). Flera SEVEN- och SEVEN PLUS-användare kan överföra sin glukosinformation till en dator med DM3.

Data Manager<sup>®</sup> 3

[www.DexCom.com](http://www.DexCom.com)

 **DexCom**<sup>™</sup>  
The Glucose Sensor Company

CE 0050

**Om du har frågor, se DM3-hjälpfilen på adressen:**

[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)

 **DexCom**<sup>™</sup>



USA: DexCom, INC  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121  
+1.858.200.0200

Utanför USA: Kontakta din lokala återförsäljare



Meditech Strategy Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129 NL-6291  
Vaals  
+31.43.306.3320

**Live Uninterrupted<sup>®</sup>**

## Data Manager 3

### Systemkrav:

Se DM3-hjälpfilen på adressen [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com) för fullständiga systemkrav:

- Microsoft .NET Framework 2.0
- 1.4 GHz Pentium 4
- 512 MB Ram med 100-150 MB ledigt utrymme
- 36 MB ledigt hårddiskutrymme (280 MB för .NET Framework 2.0)
- Skärm – 1024 x 768 pixlar
- CD-romenhet för CD-installation
- USB-port (Universal Serial Bus)

DM3 kan köras på datorer som har följande operativsystem:

- Microsoft® Windows Vista®, XP Service Pack 2, Windows® 2003 Server

---

**OBS: DexCom erbjuder inte felsökning för kompatibilitetsfel för Mac.**

---

### Installationsgrunder:

1. Mata in CD-skivan för DM3 i datorn eller hämta DM3 från webbsidan för DexCom på adressen [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com). Klicka på knappen "Download Now" (Hämta nu).
2. En dialogruta visas och ger dig anvisningar.
3. Om inte DM3 har sparats till en annan plats hittar du den under startmenyn under sökvägen *Alla program\DexCom\DexCom DM3*.

### **Om ingen dialogruta visas och du använder en DM3-CD ska du följa de här anvisningarna:**

1. Mata in CD-skivan för DM3 i datorn.
2. Öppna "Dator" från skrivbordet.
3. Dubbelklicka på på CD-enheten.
4. En dialogruta visas och ger dig anvisningar.
5. Om inte DM3 har sparats till en annan plats hittar du den under startmenyn under sökvägen *Alla program\DexCom\DexCom DM3*.