

**UPOZORNĚNÍ:** Tento software neposkytuje lékařské rady a nelze na něj v tomto ohledu spoléhat. Bez porady s poskytovatelem zdravotní péče neprovádějte žádné zásadní změny v léčbě.

DexCom Data Manager 3 (DM<sup>®</sup>3) je snadno použitelný doplňkový program, který slouží k transferu údajů o glukóze uložených v systému SEVEN<sup>®</sup> nebo SEVEN PLUS pro kontinuální monitorování hladiny glukózy do osobního počítače (PC). Větší počet uživatelů systému SEVEN a SEVEN PLUS může přenášet údaje o glukóze do počítače pomocí programu DM3.

## Data Manager<sup>®</sup> 3

[www.DexCom.com](http://www.DexCom.com)



CE 0050

**V případě dotazů nahlédněte do souboru nápovědy  
k programu DM3 na adrese:**

[www.dexcom.com](http://www.dexcom.com)



USA: DexCom, INC  
6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121  
+1.858.200.0200

Mimo USA: kontaktujte příslušného místního  
prodejce.



Meditech Strategy Consultants B.V.  
Maastrichterlaan 127-129 NL-6291  
Vaals  
+31.43.306.3320

**Live Uninterrupted<sup>®</sup>**

## Data Manager 3

### Minimální systémové požadavky:

Kompletní seznam systémových požadavků naleznete v souboru nápovědy k programu DM3 na adrese [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com):

- Microsoft .NET Framework 2.0
- procesor Pentium 4 o frekvenci 1,4 GHz
- 512 MB paměti RAM a 100 – 150 MB volné paměti
- 36 MB volného místa na pevném disku (280 MB v případě .NET Framework 2.0)
- obrazovka s rozlišením 1024 x 768 pixelů
- jednotka CD-ROM pro instalaci z disku CD
- port USB (Universal Serial Bus)

Program DM3 lze spustit na počítačích s nainstalovanými následujícími operačními systémy:

- Microsoft® Windows Vista®, XP Service Pack 2, Windows® 2003 Server

---

**POZNÁMKA: Společnost DexCom neposkytuje informace o řešení potíží s kompatibilitou systémů Mac.**

---

### Základní pokyny pro instalaci:

1. Vložte disk CD s programem DM3 do počítače nebo si stáhněte program DM3 z webových stránek společnosti DexCom na adrese [www.dexcom.com](http://www.dexcom.com). Klepněte na tlačítko „Download Now“ (Stáhnout nyní).
2. Zobrazí se dialogové okno s pokyny.
3. Pokud nebylo vybráno jiné místo určení, zástupce programu DM3 naleznete v nabídce Start v části *Všechny programy\DexCom\DexCom DM3*.

**Pokud používáte disk CD s programem DM3 a dialogové okno se nezobrazí, postupujte podle následujících pokynů:**

1. Vložte disk CD s programem DM3 do počítače.
2. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač.
3. Poklepejte na jednotku disku CD.
4. Zobrazí se dialogové okno. Postupujte podle uvedených pokynů.
5. Pokud nebylo vybráno jiné místo určení, zástupce programu DM3 naleznete v nabídce Start v části *Všechny programy\DexCom\DexCom DM3*.